


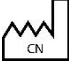







NATRACURE™ COLD THERAPY SOCKS 1 Pair Large / Extra Large	REF 707 CAT
NATRACURE™ KOLDTERAPI SOKKER 1 par Stor / ekstra stor	CHAUSSETTES DE THERAPIE PAR LE FROID NATRACURE™ 1 Paire Grand / Très Grand
NATRACURE™ SOCKEN FÜR KÄLTETHERAPIE 1 Stück Large / Groß / Extragroß	NATRACURE™ CALZE PER TERAPIA DEL FREDDO 1 Paio Grande / Extra Large
NATRACURE™ KULDETERAPISOKKER 1 par Stor / Ekstra stor	[NATRACURE™ MEIAS PARA TERAPIA DE FRIO 1 Par Grande / Extra Grande
CALCETINES DE TERAPIA EN FRÍO NATRACURE™ 1 par Grande/Extra grande	[NATRACURE™ STRUMPOR FÖR KYLTERAPI 1 par Stor / Extra Stor

 QualRep Services BV Utrechtseweg 310 – B42, 6812 AR, Arnhem – the Netherlands Phone: +31 20 788 2630 globalreg@qservgroup.com	 PolyGel, LLC 1 Danforth Drive Easton, PA 18045 USA	
QualRep Services BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Holland Telefon: +31 20788 2630	QualRep Services BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Pays-Bas Téléphone: +31 20788 2630	 YYYY-MM-DD
QualRep Services BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Paesi Bassi Telefono: +31 20788 2630	QualRep Services BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Niederlande Telefon: +31 20 788 2630	    
QualRep Services BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Holanda Telefone: +31 20 788 2630	QualRep Services BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Nederland Telefon: +31 20788 2630	UDI BAR CODE (FPO)
QualRep Services BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Nederlanderna Telefon: +31 20788 2630	Servicios de QualRep BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Países Bajos Teléfono: +31 20788 2630	

 Distributeur officiel E.B.Materials b.v. G Gezellelaan 36/2 3550 Heusden-Zolder Belgique Nr TVA: BE0859589551	Tél 0032 11 53 77 47 www.belgomedical.com/store-3/
--	--

CHAUSSETTES DE THERAPIE PAR LE FROID NATRACURE™**REF 707 CAT****1 Paire | Grand / Très Grand**

Pour soulager la douleur et l'inconfort du pied. Peuvent aider dans le traitement des effets secondaires de la chimiothérapie, la douleur de la voûte plantaire, la douleur à la plante du pied, l'épine calcanéenne, les pieds chauds, les entorses et les foulures, les affections chroniques comprenant l'arthrite, la neuropathie, la fasciite plantaire.

Utilisation prévue : Appliquer une thérapie par le chaud ou le froid aux parties du corps spécifiques pour favoriser la guérison de la douleur post-traumatique, post-opératoire et/ou chronique.

Utilisateurs visés : À utiliser chez des personnes souffrant de douleur chronique, d'arthrite, de blessures aiguës ou chroniques ou de douleur post-opératoire.

INSTRUCTIONS-FROID : AVERTISSEMENT : REFROIDISSEZ LES POCHE DE GEL UNIQUEMENT PENDANT QU'ELLES SONT INSEREES DANS LES CHAUSSETTES DE THÉRAPIE PAR LE FROID.
Placez la (les) poche(s) de gel pendant 2 heures au congélateur ou au réfrigérateur. N'utilisez pas ce produit si vous avez une sensibilité cutanée réduite ou une plaie ouverte. Si vous êtes diabétique, consultez un médecin avant d'expérimenter avec la thérapie par le froid. Ne dépassez jamais 20 minutes d'utilisation. La poche de gel DOIT atteindre la température ambiante si elle a été précédemment chauffée, avant d'être mise au congélateur ou au réfrigérateur. Les poches de gel peuvent aussi être chauffées et offrir un soulagement chaud au talon, au fascia plantaire, à l'avant-pied et aux orteils.

INSTRUCTIONS-FROID : AVERTISSEMENT : NE FAITES PAS CHAUFFER LES POCHE DE GEL ISOLEES ! FAITES CHAUFFER LES POCHE DE GEL UNIQUEMENT PENDANT QU'ELLES SONT INSEREES DANS LES CHAUSSETTES DE THÉRAPIE PAR LE FROID.

FAITES CHAUFFER AU MICRO-ONDES PENDANT 10 SECONDES POUR CHAQUE CÔTÉ.

À chaque utilisation, NE DÉPASSEZ PAS 40 secondes de temps de CHAUFFE TOTAL du produit. NE CHAUFFEZ pendant plus de 4 fois dans un laps de temps de 60 minutes. Les poches de gel DOIVENT atteindre la température ambiante si elles ont été précédemment refroidies, avant de les placer au micro-ondes.

*Ces produits doivent être complètement SECS et atteindre la TEMPÉRATURE AMBIANTE avant de passer de la thérapie par le chaud à la thérapie par le froid, ou de la thérapie par le froid à la thérapie par le chaud. Ce produit a été conçu pour être utilisé dans un micro-ondes de 800 Watt. Les températures des micro-ondes varient, vous devez donc ajuster le temps de chauffe si nécessaire mais n'utilisez PAS de micro-ondes qui dépassent 1400 Watts.

ENTRETIEN : Poche de gel - NE PAS laver à la machine ni sécher les poches de gel. Les poches de gel doivent être lavées à la main uniquement et doivent être complètement sèches avant d'être utilisées. Conserver dans un endroit frais et sec.

Jeter en cas de perforation ou de rupture des poches de gel. Enroulez - Nettoyez à la main avec un chiffon humide (non mouillé), en utilisant un savon doux et laissez sécher à l'air libre avant de l'utiliser. Éliminer conformément à la réglementation locale.

Contre-indication(s) : Les personnes qui utilisent des stimulateurs cardiaques ou des pompes à insuline ne doivent JAMAIS utiliser ces produits. N'utilisez pas ce produit si vous êtes enceintes. N'appliquez pas de chaleur sur une zone qui a perdu la sensibilité. N'utilisez pas de poches amovibles chaudes sur les zones du corps présentant des gonflements, des rougeurs ou immédiatement après vous être blessé. Dans de telles conditions, utilisez plutôt la thérapie par le froid. N'utilisez pas ce produit sur une zone souffrant de mauvaise circulation.

Avertissement(s) :

- NE FAITES PAS SURCHAUFFER. LA SURCHAUFFE DU PRODUIT PEUT ENTRAÎNER DES BRÛLURES.
- N'utilisez pas ce produit si vous avez une sensibilité cutanée réduite ou une plaie ouverte.
- Il existe des différences entre les fours à micro-ondes, les températures de chauffe peuvent donc varier. Ne laissez pas le micro-ondes sans surveillance pendant qu'il chauffe.
- Si le produit provoque une irritation de la peau, une gêne ou une mauvaise circulation, cessez de l'utiliser et informez-en votre médecin.
- Si vous souffrez de diabète, de neuropathie ou d'une mauvaise circulation, consultez un professionnel de la santé avant d'utiliser ce produit.
- NE PAS MARCHER SUR LES POCHE ! Un poids excessif peut provoquer une fuite ou une rupture des poches.
- UTILISEZ PAR-DESSUS LES VETEMENTS OU PLACEZ UN TISSU ENTRE LA POCHE CHAUDE/FROIDE ET LA PEAU, AVANT D'UTILISER LA THÉRAPIE PAR LE CHAUD OU LE FROID. ENTRE AUTRES, VOUS POUVEZ UTILISER : Une serviette légère, un tissu, un drap/une taie d'oreiller (ajustez la taille en découpant), 6 feuilles d'essuie-tout ou du jersey. Vous pouvez soit enrouler le tissu autour de la poche chaude/froide avant de la fixer au support (s'il est inclus) soit maintenir le tissu sur la peau tout en enroulant le produit sur le corps.


Attention :

- Demandez conseil à votre médecin avant d'utiliser ce produit.
- N'utilisez ce produit que pendant 20 minutes à la fois sur la zone affectée.
- Si, à un moment donné, une douleur, une éruption cutanée ou une augmentation de la douleur se produit, cessez l'utilisation et consultez votre médecin.
- N'utilisez ce produit que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans le Mode d'emploi.
- N'utilisez pas ce produit lorsque vous utilisez des timbres transdermiques (patches), des crèmes, des baumes, des pommades ou des lotions pour la peau.
- Si la poche amovible a été déchirée, surchauffée ou endommagée (et qu'elle fuit), jetez-la immédiatement.
- N'utilisez pas de chaleur en contact direct avec les yeux.
- Utilisez toujours un tissu.
- N'appliquez pas de chaleur sur les parties génitales.
- Maintenir ce produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Matériaux : CHAUSSETTES DE THÉRAPIE PAR LE FROID : Tissu en microfibre. Poche de gel : Nylon laminé avec PVC, mélange de gel breveté.

UMDNS: 25806

Fabriqué en Chine
©2023 PolyGel®, LLC

 PolyGel, LLC

1 Danforth Drive, Easton, PA 18045 USA
NATRACURE™ est une marque de PolyGel, LLC

NatraCure.com

Distributeur: E.B.Materials b.v.
www.belgomedical.com/store-3
G Gezellelaan 36/2

Distributeur officiel

E.B.Materials b.v.

G Gezellelaan 36/2

3550 Heusden-Zolder

Belgique

Nr TVA: BE0859589551



QualRep Services BV
Utrechtseweg 310 – B42, 6812 AR, Arnhem – the Netherlands
Téléphone : +31 20 788 2630
globalreg@qservegroup.com



Tél 0032 11 53 77 47

www.belgomedical.com/store-3/

Non fabriquée avec du latex de caoutchouc naturel

