









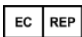

NATRACURE™ ADVANCED COOLING GEL MITTS 1 Pair 11.8" x 7.9" x 0.8"	REF 761-00NC1
NATRACURE™ AVANCERED KØLENDE GELVANTER 1 par 29,97 x 20,07 x 2,03 cm	GANTS DE GEL DE REFROIDISSEMENT NATRACURE™ ADVANCES 1 Paire 29,97 x 20,07 x 2,03 cm
NATRACURE™ HANDSCHUHE IN FORTSCHRITTLICHER KÜHLGELTECHNOLOGIE 1 Paar 29,97 x 20,07 x 2,03 cm	NATRACURE™ QUANTI IN GEL A RAFFREDDAMENTO AVANZATO 1 Paio 29,97 x 20,07 x 2,03 cm
NATRACURE™ AVANSERTE KJØLEGLHANSKER 1 par 29,97 x 20,07 x 2,03 cm	NATRACURE™ LUVAS DE GEL DE REFRIGERAÇÃO AVANÇADA 1 Par 29,97 x 20,07 x 2,03 cm
MITONES DE GEL FRIO AVANZADAS NATRACURE™ 1 par 29,97 x 20,07 x 2,03 cm	NATRACURE™ VANTAR MED AVANCERAD KYLANDE GEL 1 par 29,97 x 20,07 x 2,03 cm

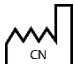 QualRep Services BV Utrechtseweg 310 – B42, 6812 AR, Arnhem – the Netherlands Phone: +31 20 788 2630 globalreg@qservegroup.com	 PolyGel, LLC 1 Danforth Drive, Easton, PA 18045 USA	
QualRep Services BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Holland Telefon: +31 20788 2630	QualRep Services BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Pays-Bas Téléphone: +31 20788 2630	 YYYY-MM-DD  XXXXX
QualRep Services BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Paesi Bassi Telefono: +31 20788 2630	QualRep Services BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Niederlande Telefon: +31 20 788 2630	    DEHP-free 
QualRep Services BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Holanda Telefone: +31 20 788 2630	QualRep Services BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Nederland Telefon: +31 20788 2630	UDI BAR CODE (FPO)
QualRep Services BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Nederlanderna Telefon: +31 20788 2630	Servicios de QualRep BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Países Bajos Teléfono: +31 20788 2630	

 Distributore ufficiale autorizzato E.B.Materials b.v. G. Gezellelaan 36/2 3550 Heusden-Zolder Belgio	www.belgomedical.com/store-2/ Tel +32 11 53 77 47
---	--

NATRACURE™ GUANTI IN GEL A RAFFREDDAMENTO AVANZATO**REF 761-00NC1****1 Paio | 29,97 x 20,07 x 2,03 cm**

Progettati per:

- Dare sollievo alle dita calde e doloranti durante e dopo la chemioterapia
- Ridurre il dolore neuropatico e la perdita delle unghie*

Funzionalità principali:

- Nuova formula GEL/ICE™ per trattamenti lunghi con la terapia del freddo
- L'ampia apertura consente di indossarli e toglierli facilmente
- Comoda chiusura in velcro al polso
- Esterno durevole, resistente alle macchie
- Morbido tessuto interno

Uso/i previsto/i: Fornire terapia del freddo a parti specifiche del corpo per agevolare la guarigione post-infortunio intervento chirurgico e/o alleviare il dolore cronico.

Utente/i previsto/i: Destinati all'uso da parte di persone affette da dolore neuropatico e fastidio alle mani e alle dita.

Indicazioni: Porre entrambi i guanti nel frigorifero o nel congelatore, avvolte in carta da cucina o poste all'interno della copertura di plastica in dotazione. Raffreddare per un minimo di 2 ore. Inserire comodamente le mani nei guanti e usare la chiusura in velcro per fissarli. Indossarli per 20 minuti ogni volta.

Cura: I rivestimenti esterni ed interni possono essere lavati a mano con acqua e sapone. Asciugare all'aria fino a completa asciugatura. Il lavaggio con saponi a basso contenuto di profumi e altri possibili additivi riduce al minimo le possibili reazioni. Smaltire secondo le normative locali.

Controindicazioni: Le persone portatrici di pacemaker o che utilizzano pompe per insulina non devono MAI utilizzare questi prodotti. Non usare in gravidanza. Non applicare freddo su aree prive di sensibilità. Non usare in caso di cattiva circolazione.

Avvertenza/e:

19. DA USARE SOLO PER IL FREDDO!
20. Non posizionare il prodotto su una ferita aperta.
21. Se il prodotto provoca irritazione della pelle, disagio o cattiva circolazione, interrompere l'uso e informare il medico.
22. In caso di diabete, neuropatia o cattiva circolazione, consultare un medico prima dell'utilizzo.
23. NON CALPESTARE GLI IMPACCHI! Un peso eccessivo può causare fuoriuscita di gel o rottura dell'impacco.
24. USARE SOPRA GLI INDUMENTI O POSIZIONARE UN'INTERFACCIA IN TESSUTO TRA L'IMPACCO FREDDO E LA PELLE, PRIMA DI UTILIZZARE LA TERAPIA DEL FREDDO. LE POSSIBILI INTERFACCIE COMPRENDONO: Un asciugamano leggero, un panno, un lenzuolo/federa (tagliato su misura), 6 strati di carta assorbente o una maglia rasata. Avvolgere l'interfaccia attorno all'impacco caldo/freddo prima di attaccarlo al supporto (se presente) oppure tenere l'interfaccia sulla pelle mentre si posiziona il prodotto sul corpo.

Cautela/e:

25. Consultare il proprio medico prima di utilizzare questo prodotto.
26. Utilizzare questo prodotto per un massimo di 20 minuti alla volta nell'area interessata.
27. Se in qualsiasi momento si verifica irritazione, eruzione cutanea o si prova un aumento del dolore, interrompere l'uso e consultare il proprio medico.
28. Utilizzare questo prodotto solo per gli scopi previsti, come descritto nelle istruzioni per l'uso.
29. Non utilizzare questo prodotto durante l'utilizzo di cerotti cutanei transdermici per la somministrazione di farmaci, creme per la pelle, balsami, linimenti o lozioni.
30. Se l'impacco rimovibile ha uno strappo, è surriscaldato o è danneggiato (e presenta fuoriuscite), sostituirlo immediatamente.
31. Utilizzare sempre un'interfaccia in tessuto.
32. Tenere lontano dalla portata di bambini e animali domestici.

Materiali: Anello in velluto in PE/Nylon, nylon rivestito in PTFE, formula in gel esclusiva

UMDNS: 25806

Prodotto in Cina

©2024 PolyGel®, LLC

 PolyGel, LLC

1 Danforth Drive, Easton, PA 18045 USA

NATRACURE™ è un marchio di PolyGel, LLC

Natrasure.com

QualRep Services BV
Utrechtseweg 310 – B42, 6812 AR, Arnhem – Paesi Bassi
Telefono: +31 20 788 2630
globalreg@qservegroup.com

NON REALIZZATO CON LATTICE DI GOMMA NATURALE

* Studi che citano la terapia del freddo per il dolore neuropatico e la perdita delle unghie
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19171552/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32036471/>
<https://www.breastcancer.org/research-news/cold-therapy-helps-hair-skin-nail-effects>
<https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/article-abstra>

Distributore ufficiale autorizzato

E.B.Materials b.v.

G. Gezellelaan 36/2

3550 Heusden-Zolder

Belgio

www.belgomedical.com/store-2/

Tel +32 11 53 77 47

