

## NATRACURE™ ZALETY ZAAWANSOWANEGO CHŁODZENIA CZAPKĄ ŻELOWĄ

-Wolne tłumaczenie na język polski. Oryginał w języku angielskim. –

762-00NC1

1 Sztuka | 30 cm x 19 cm x 5 cm

Przeznaczone do pomocy w:

- Redukcji utraty włosów\*
- Łagodzeniu pulsującego bólu głowy i bólu podczas i po chemioterapii

Kluczowe cechy:

- Nowa formuła GEL/ICETM dla długotrwałych zabiegów chłodzenia
- Izolowany materiał zewnętrzny pomaga utrzymać zimno
- Zaokrąglona góra dla bardziej precyzyjnego działania
- Pasuje na obwody głowy od 57 cm do 65 cm
- Nadaje się do zamrażarki lub lodówki

### **Przeznaczenie:**

Tylko do chłodzenia: Zapewnia terapię chłodzącą wybranym częściom ciała w celu wspomagania gojenia po urazach, operacjach, bólu przewlekłym oraz w łagodzeniu skutków ubocznych chemioterapii.

### **Przeznaczenie dla użytkownika:**

Tylko do chłodzenia: Dla osób z przewlekłym bólem, zapaleniem stawów, świeżymi urazami, bólem pooperacyjnym lub pacjentów poddawanych chemioterapii.

### **Instrukcja użycia:**

Umieść czapkę w lodówce lub zamrażarce, owiniętą ręcznikiem papierowym lub wewnątrz dołączonej plastikowej osłony. Chłódź przez minimum 2 godziny. Nałóż czapkę na głowę, użyj górnego zapięcia na rzep, aby dopasować, a dolnego rzepu, jeśli masz kucyk, aby czapka pozostała na miejscu. Używaj przez 20 minut jednorazowo.

### **Pielęgnacja:**

Myj zewnętrzny i wewnętrzny materiał ręcznie wodą z mydłem. Susz na powietrzu lub osusz do całkowitego wyschnięcia. Używaj mydeł o niskiej zawartości zapachów i innych dodatków, aby zminimalizować ryzyko reakcji. Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.

### **Przeciwwskazania:**

Osoby używające rozruszników serca lub pomp insulinowych NIGDY nie powinny używać tego produktu. Nie używać w czasie ciąży. Nie stosować zimna na miejsca o zaburzonej wrażliwości. Nie stosować przy słabym krążeniu.

### **Ostrzeżenia:**

1. TYLKO DO UŻYTKU W CELACH CHŁODZENIA!
2. Nie stosować produktu na otwartą ranę.
3. Jeśli produkt powoduje podrażnienia skóry, dyskomfort lub problemy z krążeniem, zaprzestań używania i skontaktuj się z lekarzem.
4. Jeśli masz cukrzycę, neuropatię lub słabe krążenie, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.
5. NIE STAWAJ NA PAKIETACH! Nadmierne obciążenie może spowodować wyciekanie lub pęknięcie żelu.
6. UŻYWAJ PRZEZ UBRANIE LUB UMIEŚĆ MATERIAŁ MIĘDZY PAKIETEM A SKÓRĄ PRZED ROZPOCZĘCIEM TERAPII. MOŻLIWE MATERIAŁY: Lekkie ręczniki, szmatki, poszewka na poduszkę (pocięta na rozmiar), 6 warstw ręcznika papierowego lub opaska elastyczna.

### **Ostrożność:**

1. Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem tego produktu.
2. Stosuj tylko przez 20 minut jednorazowo na dotknięte miejsce.
3. Jeśli wystąpi ból, wysypka lub zwiększenie bólu, zaprzestań używania i skonsultuj się z lekarzem.
4. Stosuj produkt wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w instrukcji.
5. Nie stosować produktu podczas stosowania plastrów transdermalnych, kremów, maści lub balsamów.
6. Jeśli wymienny pakiet został uszkodzony lub przecieka, natychmiast wyrzucić.
7. Zawsze używaj materiału ochronnego.
8. Trzymaj poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

**Material:**

PE/Nylon Velvet Loop, Nylon pokryty PTFE, Własna Formuła Żelowa

**UMDNS:** 25806

Wyprodukowano w Chinach

©2024 PolyGel®, LLC

PolyGel, LLC

1 Danforth Drive, Easton, PA 18045 USA

NATRACURE™ jest marką PolyGel, LLC

**QualRep Services BV**

Utrechtseweg 310 – B42, 6812 AR, Arnhem – Holandia

Telefon: +31 20 788 2630

globalreg@qservegroup.com

NatraCure.com

\*Badania na temat chłodzenia w przypadku bólu neuropatycznego i utraty włosów:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19171552/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32036471/>

<https://www.breastcancer.org/research-news/cold-therapy-helps-hair-skin-nail-effects>

<https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/article-abstract/2711245>

Nie zawiera lateksu z naturalnego kauczuku.