

Indikace

- Syndrom kubitálního tunelu
- Noční dlaha
- Denní dlaha

Doporučení k použití

- Zejména v noci se vyhněte dlouhému ohýbání lokte
- Nepokládejte hranu dlahy dlouho na rovný povrch, abyste se vyhnuli stlačení nervu
- Vyhněte se používání telefonu touto rukou.

Paže je postupně omezena v možnosti ohybu (flexe) pro umožnění hojení nervu kubitálního tunelu (asi 60° flexe).

Je možné paži znehybnit nataženou nebo v určitém úhlu umístěním hliníkové dlahy do ohybu loktu (ne ze strany), ale obvykle to není indikováno u syndromu kubitálního tunelu.

Charakteristika

Univerzální: levá ruka = pravá ruka (oboustranné použití)

Velikost: univerzální

Barva: černá

Vnitřní vyjímatelná a tvarovatelná hliníková dlaha

Část těla: dlaha na paži-loket

Č. artiklu: EBM-CTS-CZ-1

Webová stránka :

www.belgomedical.com/store-10/item/hornimi-koncetinami/loket/orteza-lokte-syndrom-kubitalniho-kanalu/

Jak si to nasadit?

(příklad pro pravou paži/loket)



Položte dlahu před sebe na stůl.
Logo musí být na levé straně (dole).



Pravá paže



Pravá paže

Vycentrujte vnitřní paži.



Levá paže



Zavřete horní suchý zip (strana ramene).



Zavřete dolní suchý zip (strana zápěstí).
Nepříliš utahovat



Tyč by měla být umístěna na vnitřní straně pravé paže



Levá paže: flexibilní tyč se bude nacházet na vnější straně levé paže.

Český distributor

Evidence Based Materials b.v.

Kerkstraat 29/2

3540 Schuren

Belgie

Tel 0032 13.66.75.99 (14:00-17:00)

orderebmaterials@hotmail.com

webové stránky:

www.belgomedical.com/store-10/

Ortýza lokte pro syndrom kubitálního tunelu



© Evidence Based Materials bv
20/10/2025 V1