

Indications attelle de coude nerf cubital EBM-CTS

traitement conservateur du syndrome du nerf ulnaire au coude
compression du nerf cubital au coude

attelle de nuit non immobilisant
attelle de repos pendant la journée

Caractéristiques

universelle : bras gauche-bras droit
(ambidextre)

Taille : universelle

Couleur noire

Prévue d'une attelle flexible adaptable
intérieure en aluminium

Part du corps: attelle pour le coude-bras

Nr.art. EBM-CTS-FR

Site web:

www.belgomedical.com/store-3/

Mode d'emploi attelle de coude nerf cubital (exemple pour bras droit)

Posez l'attelle devant vous sur la table



logo devant vous à gauche



glissez le bras droit à l'intérieur



pli du bras bien centré au milieu



fermez velcro du dessus (épaule)



fermez velcro en dessous (main)



l'attelle flexible en aluminium se trouve sur le côté du bras (**non** en dessous du coude)



le bras est 'freiné' dans la possibilité de plier (fléchir-flexion) afin que le nerf cubital puisse guérir (60° flexion +/-)

Distributeur

E.B.Materials Bv
G Gezellelaan 36/2
3550 Heusden-Zolder
Belgique
Tél 0032 (0)11.53.77.47



Attelle de coude nerf cubital EBM



- compression nerf cubital bras

A utiliser au lieu de la fiche produit- du fabricant !

© Evidence Based Materials bv 11/3/2022
V5