

Nurodymai Belgomedical alkūnės įtvarui: ulnarinė alkūnės ortozė

- Kubitalinio tunelio sindromas
- Naktinė įtvara
- Dieninė įtvara
- RSI – pasikartojančių judesių traumos
- Tenisininko alkūnė
- Po operacijos arba po gipso / imobilizacijos
- Kasdienis naudojimas: dienos metu – poilsio padėčiai
- Rankos imobilizacija IV infuzijos metu

Charakteristikos:

- Universalus: kairė ranka = dešinė ranka
- Kairysis alkūnė = dešinysis alkūnė (abipusis)
- Dydis: universalus
- Juoda spalva
- Vidinė nuimama ir formuojama aliuminio įtvara
- Kūno dalis: rankos–alkūnės įtvara
- Art. Nr. EBM-CTS
- Interneto svetainė:
www.belgomedical.com/store-19/

Naudojimo instrukcija (pavyzdys DEŠINEI rankai / alkūnei)

Padėkite įtvaramą priešais save ant stalo.



Įkiškite dešinę ranką į vidinę rankovę



Įsitikinkite, kad alkūnės sąnarys yra gerai centruotas viduryje.



Uždarykite viršutinį Velcro užsegimą (pečių pusėje).



Uždarykite apatinį Velcro užsegimą (riešo pusėje).



Lanksti vidinė įtvara (ją galima sulenkti, jei reikia) yra padėta šalia rankos, o ne po alkūne.



Kairiajai rankai: aliuminio įtvara yra padėta ant kairės rankos išorinės pusės, kad Velcro užsegimai būtų uždaryti. Rezultatas: alkūnės lenkimas yra ribojamas (stabdis) (be imobilizacijos!).

Rankos lenkimo galimybė palaipsniui ribojama, siekiant užtikrinti kubitalinio tunelio nervo atsigavimą (maždaug 30° lenkimas ±). Galima imobilizuoti ranką tiesiai arba tam tikru kampu, padedant aliuminio įtvaramą alkūnės įlankoje (ne šone). Tačiau tai paprastai nėra rekomenduojama kubitalinio tunelio sindromo atveju.

Platintojas Lietuvoje

Evidence Based Materials bv

Kerkstraat 29/2

3540 Schuren

Belgija

Tālrunis 0032 13 66 75 99

www.belgomedical.com/store-19/

Mēs kalbame angļu, prancūzu, olandu,
vokiešu, itāļu ir angļu valodās.



Alkūnēs ītvaras alkūnēs kanālo sindromas



© Evidence Based Materials bv
5-12-25 V1