

Indikaties elleboogbrace :

- Kubitaal tunnel syndroom
- Nachtspalk
- RSI
- Tenniselleboog
- Postoperatief : of na gipsverband
- Overdag : rustspalk

Eigenschappen :

Universeel : Links (Linkerarm) of rechts (Rechterarm)

Een maat.

Kleur : Zwart

Zonder latex.

Flexibele buigbare interne aluminiumspalk (ingebouwd)
Schuif uit voor wassen.
Plooi in gewenste hoek (alleen indien aangewezen)

Lichaamsdeel : Elleboog-arm

Art.nr. EBM-CTS

Gebruiksaanwijzing

leg de spalk open voor je op tafel



logo linksonder
(ook voor linkerarm)



rechterarm inschuiven



elleboogplooi mooi in het midden



bovenste klittenband dichtmaken



onderste klittenband dichtmaken



de aluminium spalk zit aan de zijkant van de elleboog (**niet** onder de elleboogpunt, **niet** in de elleboogplooi)
Linkerarm :spalk zit aan buitenzijde linkerarm bij sluiten.



de arm wordt 'afgeremd' in zijn buiging (flexie) zodat de zenuw kan genezen.
Alternatief: je plaatst de buigzame reeds gebogen spalk in de elleboogplooi.
Effect : je immobiliseert in 1 richting.
Alleen zo toe te passen mits goedkeuring van je behandelaar.

Verdeler

Evidence Based Materials Bvba

G.Gezelelaan 36/2

3550 Heusden-Zolder

België

Tel 0032 (0)11.53.77.47

www.belgomedical.com/store-1/

www.belgomedical.com/contact-1/

ebmbvba@hotmail.com

EBM cubitaal tunnel syndroom spalk

Dit productblad toepassen i.p.v.
productblad fabrikant.

© Evidence Based Materials bvba
25/2/2022 V3