

Indikationer Armbågsortos Kubitaltunnelsyndromet EBM

- Kubitaltunnelsyndrom
- nattskena
- RSI
- lateral epicondytit-tennisarmbåge
- Postoperative or after plaster/immobilisation
- Daily use: restsplint
- Konservativ behandling utan kirurgi

Egenskaper-produktbeskrivning :

Universell : Links (Linkerarm)oder
Rechts (Rechterarm)

Unistorlek.

Farge : sort

Inte Latex.

Flexibel aluminiumskena

Kroppsdel : Ellbogen

Art.nr. EBM-CTS-SE-1

Hur används Användningsinformation (se bilder) 1. Exempel höger arm



Öppna alla krok-/ögelfästen.
Armbågsortos att placera på bordet



Placera armbågen i stödet enligt bilden.
Glida in höger arm



Centrera



Stäng kardborreband övre delen



Stäng underside



Alu-skena på insidan
armbåge (**inte** nedan armbågen (ben),
inte i armbågsveck)



Justera om för komfort.

Var försiktig så att stödet inte dras åt
för mycket, justera om efter behov och
säkerställ att stödet är i rätt läge.

Obs: Armbågsstödet kan tas bort, böjas
till önskad position (enligt
behov för skada / tillstånd) och sättas in
igen. Metallstödet är utformat för att
sitta på armbågsledens främre sida eller
mediala sidan eller långsidan.

Vänster arm : alu-skena på yttersida
vänster arm.

Mål: för att förhindra mycket böjning
(flexion)

Auktoriserad distributör

Evidence Based Materials b.v.

G Gezellelaan 36/2

3550 Heusden-Zolder

Belgien

Tel 0032 (0)11.53.77.47

<https://www.belgomedical.com/store-7/>

ebmbvba@hotmail.com

Armbågsortos Kubitaltunnelsyndromet

Bruksanvisning



