

Hűtősapka jégsapka kemoterápia 762-00NC1

Használati utasítás – Fejbőr hűtés alkalmazása a hideg sapkával

•Kövesse a gyártó használati utasításában szereplő ajánlásokat, a használat időtartama alapján.

A gyártó általános ajánlása sport sérülések kezelésére mindössze 20 perc, de a kemoterápia kezelés időtartama sokkal hosszabb (lásd fent).

Ezeknek a hűtőelemeknek a hideg időtartama akár 90 perc is lehet: a hideg tasakok egyenletesen és hosszabb ideig biztosítják a teljesítményüket.

•Hogyan kell használni?

Tanácsok a hideg sapka használatához.

Ajánlások és tippek:

•Kemoterápiás kezelések között a hűtőelemeket a fagyasztóban kell tárolni (legalább 2 órán keresztül fagyasztva, -18 °C).

A hideg sapkák a fagyasztóban korlátlan ideig tárolhatók, és továbbra is puhák és rugalmasak maradnak.

•Hogyan tároljam őket a mélyhűtőben?

A gyártó csomagolásában.

Ne érintkezzen élelmiszerekkel.

•A kezelés napján egy kis hűtőboxba helyezze őket.

•Hogyan tarthatom a hideg sapkát hosszabb ideig hidegen a hűtőboxban?

Helyezze őket például szigetelő tasakba, törölközőbe, moltonba, stb.

•Viselhet akár egy eldobható vagy egyszer használatos sebészeti sapkát is.

•Kezdje el a fejbőr hűtését 10-15 perccel (vagy 30' referencia *2) a kemoterápia előtt / vagy az infúzió kezdete előtt (= csepegtetés).

•A hidegterápia előtt helyezzen egy darab anyagot/szigetelő anyagot a hűtőpárna és a bőr közé.

Megfelelő köztes rétegek lehetnek: egy könnyű törölköző, egy darab szövet, lepedő/párnahuzat (méretre vágva), 6 réteg papírtörölköző vagy egy jersey.

Az infúziós oldat intravénás infúzióval (csepegtető infúzióval) kerül beadásra.

•Húzza fel a hideg sapkát a kemoterápia alatt.

•Az infúzió után a hideg hűtősapkát még 10-15 percig (vagy 90' referencia *2) a kemoterápia után is viselni kell.

Saját hideg hűtősapka? Elviheti, ha engedélyezett.

•*2 A kezelés pontos időtartamát az orvos határozza meg.

A teljes időtartam többek között a gyógyszer koncentrációjától vagy erősségétől függ, valamint attól, hogy a gyógyszer mennyire gyorsan ürül a veséken keresztül.

•Ha nem bírja elviselni a hideget, a használat során egy kendőt, törölközőt vagy más szigetelő anyagot helyezhet a sapka és a bőr közé.

•Hagyja megszáradni a hideg hűtősapkát, mielőtt visszahelyezi a fagyasztóba

•Fejfájás/migrén esetén elegendő lehet, ha a hideg hűtősapkát csak a hűtőbe helyezi.

•Ha kétségei vannak, konzultáljon kezelőorvosával, onkológussal, ápolóval, koordinátor ápolóval vagy bőrgyógyással.

Belgomedical ügyfélszolgálat

E.B.Materials b.v.

G.Gezellelaan 36/2

3550 Heusden-Zolder

Belgium

Telefon : 0032 11 53 77 47

ÁFA szám : BE0859589551

www.belgomedical.com/store-11/