

## **Hidegterápia Achilles-ín (NatraCure)**

### **Használati útmutató zokni**

Fagyasztás előtti: minimális hőmérséklete: környezeti hőmérséklet-szobahőmérsékleten

Fagyasztás -18°C

Fagyasztás minimális 2 óra

Közvetlenül a bőrre : nem = használd a zoknit

Normál kezelési idő : max. 20 percen

1/ 20 perc hűtés / 2 órás pihenőt / 20 perc hűtés

vagy 2/ 10 perc hűtés / 10 perc pihenőt / 10 perc hűtés / 2 órás pihenőt

(Bővebb információért vagy tanácsért forduljon orvosához)

Ne használja nyílt, vérző vagy nedvedző sebre.

### **Kezelési és mosási útmutató-Care and washing instructions**

Hideg pakolás: enyhe szappannal

Nem mosógépben

Nincs hajszárító.

Csak kézzel mosható.

Használat előtt meg kell tisztítani és meg kell szárítani.

Zokni: kézzel mosni a enyhe szappannal. Szárítás: aszalás a szabadban. Teljesen szárítsa meg ezeket, mielőtt újra használná.

### **Figyelem**

Hűvös, száraz helyen, a közvetlen napsugárzástól védve, gyermekektől elzárva tárolandó

Hideg pakolás: ne használja a terméket, ha sérült.

Hivatalos forgalmazójának:

E.B.Materials b.v.

Belgomedical

G.Gezelelaan 36/2

3550 Heusden-Zolder

Belgium

BTW 0859589551

Tel 011537747

FAGG nr BE/CA01/1-11763

[www.belgomedical.com](http://www.belgomedical.com)