

Cold therapy socks (NatraCure) Chaussette réfrigérante (Natracure)

Mode d'emploi -FROID-

Le produit doit être à température ambiante avant de placer dans le congélateur.

2 heures dans le congélateur à max.-18 °C.

Mettre le coldpack dans la chaussette , dans la poche postérieure (pas directement sur la peau)

Utilisation maximale (normale) 20' ou sur conseil de votre médecin.

A ne pas mettre sur des blessures/plaies ouvertes.

A ne pas marcher sur la chaussette.

Si le froid est trop intense, mettre une couche d'isolation supplémentaire entre le coldpack et le tissu couvrant le tendon d'achille.

Entretien

Coldpacks: pas machine à laver, pas de sechoir.

Lavage à la main uniquement.

Doivent être sec avant l'utilisation.

Coldpacks: conservation: lieu frais et sec.

Lavage chaussettes: à la main, savon doux.

Sécher à l'air ambiant.

Distributeur:

E.B.Materials b.v.

G.Gezellelaan 36/2

3550 Heusden-Zolder

Belgique

BTW 0859589551

Tél 0032 / (0) 11537747

FAGG nr BE/CA01/1-11763

www.belgomedical.com – choisir sa langue