

## Cold therapy socks (NatraCure)

### Gebruiksaanwijzing cold gel pack-koud kompres

Product moet op kamertemperatuur zijn vooraleer in de diepvries te plaatsen  
2 uur in diepvries max. tot -18 °C.

Afkoelen met coldpack in de sok aangebracht (niet direct op de huid)

Gebruiksduur max. 20 minuten (of advies arts)

Niet op open wonden.

### Aantrekken

In de bovenzijde zit een dubbel opening om je voet in te schuiven.

Coldpacks (4) zijn reeds aangebracht bij achillespees (2) + voetzool (2)

U kan ook de kleine coldpack op de voetrug inschuiven..

Contra-indicaties koudetherapie (arts adviseert)

1. cardiovasculaire aandoeningen
2. overgevoeligheid voor koude
3. Raynaud syndroom
4. arteriële doorbloedingsstoornissen
5. diabetes mellitus

### Gebruiksaanwijzing hot gel pack-warm kompres

Product moet op kamertemperatuur zijn vooraleer op te warmen

Alleen opwarmen van een pack op kamertemperatuur!

Opwarmen microgolf (max 350W) gedurende 10 seconden/zijde.

Overschrijd niet 40 sec totaal tijd per gebruik bij opwarmen.

Maximaal 4 x opwarmen/uur.

Niet op open wonden.

### Onderhoudsvoorschriften

Coldpacks: geen machinewas of droger gebruiken.

Alleen handwas.

Moeten volledig droog zijn alvorens in gebruik te nemen.

Coldpacks: bewaren op koele, droge plaats.

Sokken: handwas als sokken met milde zeep. Luchtdrogen alvorens opnieuw te gebruiken.

### Waarschuwing

Buiten het bereik van kinderen en dieren houden.

Niet gebruiken indien gelverpakking beschadigd is.

Product is ontwikkeld om te gebruiken in een microgolf van 800W

### Milieu

Verwijderen op einde levensfase conform volgens de lokale wetgeving.

Distributeur:

E.B.Materials b.v.

G.Gezellelaan 36/2

3550 Heusden-Zolder

BTW 0859589551

Tel 011537747

FAGG nr BE/CA01/1-11763

www.belgomedical.com