

Cold therapy socks (NatraCure)

Gebruiksaanwijzing cold gel pack-koud kompres

Product moet op kamertemperatuur zijn vooraleer in de diepvries te plaatsen
2 uur in diepvries max. tot -18 °C.

Afkoelen met coldpack in de sok aangebracht (niet direct op de huid)

Gebruiksduur max. 20 minuten (of advies arts)

Niet op open wonden.

Aantrekken

Coldpack (1) is reeds aangebracht bij achillespees

Contra-indicaties koudetherapie (arts adviseert)

1. cardiovasculaire aandoeningen
2. overgevoeligheid voor koude
3. Raynaud syndroom
4. arteriële doorbloedingsstoornissen
5. diabetes mellitus

Gebruiksaanwijzing hot gel pack-warm kompres

Product moet op kamertemperatuur zijn vooraleer op te warmen

Alleen opwarmen van een pack op kamertemperatuur!

Opwarmen microgolf (max 350W) gedurende 10 seconden/zijde.

Overschrijd niet 40 sec totaal per gebruik bij opwarmen.

Maximaal 4 x opwarmen/uur.

Niet op open wonden.

Onderhoudsvoorschriften

Coldpacks: geen machinewas of droger gebruiken.

Alleen handwas.

Moeten volledig droog zijn alvorens in gebruik te nemen.

Coldpacks: bewaren op koele, droge plaats.

Sokken: handwas als sokken met milde zeep. Luchtdrogen alvorens opnieuw te gebruiken.

Waarschuwing

Buiten het bereik van kinderen en dieren houden.

Niet gebruiken indien gelverpakking beschadigd is.

Product is ontwikkeld om te gebruiken in een microgolf van 800W

Milieu

Verwijderen op einde levensfase conform volgens de lokale wetgeving.

Distributeur:

E.B.Materials b.v.

G.Gezellelaan 36/2

3550 Heusden-Zolder

BTW 0859589551

Tel 011537747

FAGG nr BE/CA01/1-11763

www.belgomedical.com