


Gipshoes douchen hand

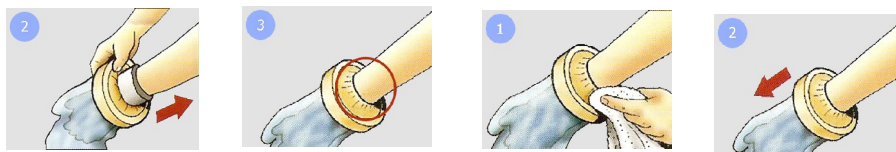

Maten : medium – 305 mm -12” CE Made in Taiwan

NL Artsen adviseren het gebruik van de gipshoes voor het baden en douchen.

Gebruiksaanwijzing

Vooraleer te starten trekt u een pantykousje over het gips.

Dit vergemakkelijkt het aantrekken van de beschermende douchehoes en verlengt de levensduur.

Verder verwijdert u alle scherpe randen van de gips , eventueel afschuren.

Hou de ring stevig vast en trek deze tot voor of na de eindrand van de gips/verband teneinde insijpeling van water te voorkomen.

Trek de bruine binnenring lichtjes terug zodat de bruine rand een bobbeltje vormt en zo geen water binnen kan.

Voorzorgen

Buiten bereik van kinderen.

Niet langer dan 15 minuten aanhouden.

Door één patiënt te gebruiken.

Verwijderen : dep eerst men een handdoek overblijvend water weg op bruine ring. Trek nu, liefst met beide handen op de buitenring (niet aan plastic zelf trekken). Nazorg : goed laten uitdrogen, buiten zonlicht houden. Eventueel talken van rubber ring voor lange bewaring.