


## Gipsschutz duschen Arm

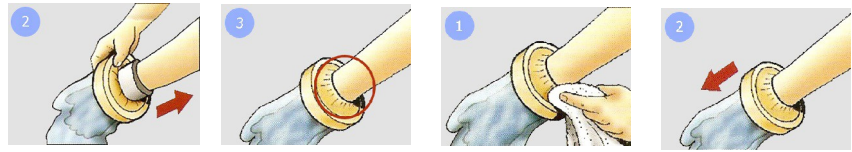

Größen : small und medium  
Abmessungen: Erwachsenen-Kinder

NL Ärzte empfehlen ihren Patienten das Produkt beim Duschen und Baden.

### Benutzeranleitung

Für den ganzen Arm. Produkt enthält kein Latex.

Gips: scharfe Kanten entfernen. Glasfasergewebe oder scharfe Finger- Fußnägel.

Decken Sie scharfe Objekte mit einem Verband oder einer abgeschnittenen Socke ab.

Einfach anziehen? Kleine Panty-Hose über den Gips anziehen.

Verlängert auch die Lebensdauer.

Dehnbare Öffnung erleichtert das Anziehen: Das zentrale Loch ist dehnbar.

Ring gut festnehmen mit 2 Hände und bis über den Gips/Bandage anziehen Richtung Kniekehle, danach die Gummi etwas zurück bringen so das ein kleine Beule entsteht und so kein Wasser durchkommt.

Entfernen : erst Ring mit Handtuch trocken machen. Mit beide Hände (nur) auf die Außenring ziehen. Nachsorge : gut trocknen lassen. keine Sonne, eventuell Talkumpuder auf die Gummi (länger haltbar)

### Vorsichtsmaßnahmen

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Aufsicht von Erwachsenen empfohlen bei Kindern.

Nicht länger als ca. 15 Minuten anhalten.

Beschwerden oder Schwellungen beim Gummimembran : bitte nicht weiter benutzen und Ihr Arzt kontaktieren.

### Kontraindikationen

Nicht zum Schwimmen geeignet

Nicht geeignet für offene und unbedeckte-freiliegende Wunden.

Gefäßkranken Menschen.

Nur von einem einzigen Patienten benutzt werden.

Kann mehrmals verwendet werden.