


Brugsanvisning badebeskytter til ben-underben voksen

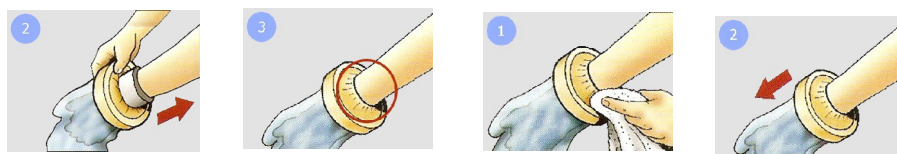

Størrelser : medium

Badebeskytteren indeholder ikke latex.

DK Anbefalet af læger til beskyttelse af bandager og gips.

Brugervejledning

Badebeskytteren skal trækkes lidt tilbage, efter at den er kommet op over gips eller bandage, så vandet nemt løber ned og væk fra det indbundne. Badebeskytteren kan bruges igen og igen.

Forholdsregler

Forholdsregler: Opbevares utilgængeligt for børn.

Varighed af anvendelsen: højst er for 30 minutter.

Badebeskytteren er beregnet til en-patient brug.

Ikke egnet til åbne sår og ubeskyttede sår.

Holdbarhed: 6-8 ugers ved normal daglig brug.

Klassificering 09 33 89 01 - Andre hjælpemidler til vask, bad og brusning.